

## Huuhtelu- ja liotusaine sairaalavälineille

### Kuvaus tuotteesta

Suma Med Rinse Plus on erityisesti sairaalavälineiden pesuun soveltuva, CE-merkitty huuhtelu- ja liotusaine. Se on lisäksi erittäin hyvä liotusaine verisille, ruosteisille ja vaikeasti likaantuneille instrumenteille.

### Ominaisuudet

- Ainutlaatuinen koostumus; yhdistetty huuhtelu- ja liotusaine.
- Takaa nopean kuivumisen sekä raidattoman ja pisarattoman lopputuloksen.
- Matalavaahtoinen ja siksi tehokas.
- Voidaan käyttää myös saostumanpoistoaineena.
- Tiivistetty tuote on edullinen käytössä.

### Edut

- Ainutlaatuinen koostumus; yhdistetty huuhtelu- ja liotusaine.
- Takaa nopean kuivumisen.
- Raidaton ja pisaraton lopputulos.
- Matalavaahtoinen ja siksi tehokas.
- Voidaan käyttää myös saostumanpoistoaineena.
- Tiivistetty tuote on edullista käytössä.

### Käyttöohje

#### Huuhteluaineena:


Suma Med Rinse Plus annostellaan suoraan pesukoneen huuhteluainesäiliöön automaattisen annostelulaitteen avulla tai käsin. Annostus 0,2 - 0,4 g/l. Aineen riittävyys on tarkistettava säännöllisesti.

**Liotus:** 1 osa Suma Med Rinse Plus -tuotetta sekoitetaan 10:een osaan vettä. Esineitä liotetaan noin 10 minuutin ajan. Instrumentteja voidaan liottaa irrallaan tai korissa. Hopeoidut instrumentit tulee käsitellä erikseen.

**Kalkinpoisto:** Annostellaan 1 osa Suma Med Rinse Plus -tuotetta ja 2 osaa vettä pesutankkiin. Koneen annetaan käydä 10 - 15 minuutin ajan, minkä jälkeen se tyhjennetään ja huuhdellaan huolellisesti.

### Menetelmä

Huuhdele ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Suojakäsineiden ja kosteusvoiteen käyttö on suositeltavaa.

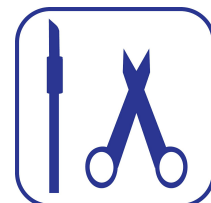



Diversey<sup>TM</sup>

# suma<sup>®</sup> Med Rinse Plus

## Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): ~ 2  
pH-arvo (käyttöliuos): ~ 2.5  
Suhteellinen tiheys (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.08

*Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.*

## Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta [sds.diverse.com](https://sds.diverse.com). Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

## Yhteensopivuus

Suma Med Rinse Plus sopii useimmille sairaaloissa tavattaville materiaaleille, kun sitä käytetään ohjeen mukaisesti.

## Ympäristötiedot

Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun (EU):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit.

[www.diverse.com](https://www.diverse.com)

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 02/12/2021 fi-FI (P01216)