

DiverseyTM

Suma[®] Med Super LpH

Sairaalainstrumenttien pesuaine

Kuvaus tuotteesta

Suma Med Super LpH on heikosti emäksinen, CE-merkitty tiivistetty pesuneste, joka soveltuu erityyppisiin sairaalavälineiden pesu- ja desinfektiolaitteisiin.

Ominaisuudet

- CE-merkitty Suma Med Super LpH-pesuneste ei sisällä lipeää.
- Heikosti emäksisenä se soveltuu alumiiniin ja muiden kevytmetallien puhdistukseen erityisesti pehmeän ja keskikovan veden alueilla.
- Soveltuu myös laboratoriovälineiden pesuun.

Edut

- Sisältää mietoja emäksiä ja kompleksointiaineita, jotka takaavat hyvän pesutehon.
- Soveltuu kaikkiin vedenkovuuksiin.
- Matalan pH:n ansiosta ei syövytä alumiinia eikä muita kevytmetalleja.
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa pesu- ja desinfektiolaitteissa.
- Estää kalkkisaostumien muodustumisen koneisiin.
- CE-merkitty.

Käyttöohje

Annostellaan pesu- ja desinfektiolaitteen automaattisen annostelulaitteen avulla.

Annostus

Suosittelava annostus on 2-3 g/l veden kovuuden ja laitteen käyttämän pesuveden määrän mukaan.

**Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*

Menetelmä

Annostellaan annostelulaitteen avulla. Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Suojakäsineiden ja kosteusvoiteen käyttö on suositeltavaa.

CE





Diversey™

suma® Med Super LpH

Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): > 12
pH-arvo (käyttöliuos): ~ 11
Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.15

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalityössä. Niitä ei voi käyttää ohjeina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Suma Med Super LpH sopii useimmille sairaaloissa tavattaville materiaaleille, kun sitä käytetään ohjeen mukaisesti. Ei saa käyttää kaikkein alkaliherkimmille materiaaleille, kuten eloksoidulle alumiinille.

Ympäristötiedot

Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun (EU):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit.

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 01/12/2021 fi-FI (P01151)